

Einwegschutzmasken - 10 Karton mit 50 Stück **48,00 €Zzgl. MwSt** Covid-schutzmaterial



Nos masques sont certifiés conforme à la norme européenne en vigueur EN14683 : 2019

Fiche technique des masques chirurgicaux

Pour une protection optimale, le masque chirurgical doit être porté avec attention sur votre visage. Les étapes suivantes vous permettent d'être protégé efficacement :

- 1 - Se laver les mains et placer le haut du masque sur le nez et les bandes élastiques autour des oreilles, face devant à l'utilisateur.
- 2 - Ajuster la bague de la base du masque sur le nez pour adapter la forme à votre morphologie, puis appuyer le bas du masque sous votre menton.
- 3 - Procéder aux derniers ajustements pour assurer une couverture efficace du nez et de la bouche.
- 4 - Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
- 5 - Lancer/recueillir les mains après avoir retiré votre masque, et jeter-le dans une poubelle fermée après usage.

Mise en garde :

- Ce produit est à usage chirurgical. Il est jetable et ne peut pas être lavé et réutilisé.
- Durée d'utilisation recommandée : 4 heures.
- Ne pas utiliser en salle d'attente ou en salle d'opération.
- Ce produit ne doit pas être utilisé après la date limite de conservation (voir sur le dessous de la boîte ou le emballage en allemand/français).
- Le produit est à jeter/recueillir au sac et à l'étiquette de température extrêmes.
- Ce produit est un dispositif médical.



SPEZIFIKATIONEN

Marke	Securite shopping
Standplatte	
Befestigung	Keine befestigung
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Lieferzeit	1-3 arbeitstage
Kategorie	Covid-schutzmaterial
Typ	Kontrollgerate

DETAIL

Los mit 10 Kartons mit 50 chirurgischen Einwegmasken.

Chirurgische Masken Typ II - ERWACHSENE

3-lagig - nicht steril und zum einmaligen Gebrauch
Bakterienfiltrationseffizienz > 98% (Typ 2).

Filtertröpfchen, Pollen, Staub.

Bestehend aus 3 Schichten (initiiertes Träger / Polypropylenfaserfilter).

Deckt Nase und Mund ab.

BESCHREIBUNG

Ohrfixierung durch Gummiband.

Einweg 3-lagige **chirurgische Schutzmaske**

Blaue Vliesmaske, Einheitsgröße mit Gummizug für besseren Schutz und rechtliche Hinweise auf FRANZÖSISCH).

Um die Ausbreitung von Covid-19, Erkältungen und Grippe zu verhindern, schützt es sowohl den Träger der Maske vor pathogenen Keimen als auch die um ihn herum vor jeglicher mikrobieller Verbreitung.

CE-zertifiziert - EN14683 : 2019

Um maximalen Schutz zu gewährleisten, muss die Maske tagsüber regelmäßig ausgetauscht werden. Die empfohlene Tragezeit beträgt maximal 4 Stunden.

Einwegschutzmasken - 10 Kartons mit 50 chirurgischen Masken für Erwachsene Typ 2 - Entspricht der Norm EN14683 / 2019

Prüfbericht auf Anfrage

Einwegschutzmasken - 10 Karton mit 50 Stück



SPEZIFIKATIONEN

Marke	Securite shopping
Standplatte	
Befestigung	Keine befestigung
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Lieferzeit	1-3 arbeitstage
Kategorie	Covid-schutzmaterial
Typ	Kontrollgerate

DETAIL

Los mit 10 Kartons mit 50 chirurgischen Einwegmasken.

Chirurgische Masken Typ II - ERWACHSENE

3-lagig - nicht steril und zum einmaligen Gebrauch
Bakterienfiltrationseffizienz > 98% (Typ 2).

Filtertröpfchen, Pollen, Staub.

Bestehend aus 3 Schichten (initiiertes Träger / Polypropylenfaserfilter).

Deckt Nase und Mund ab.

Abmessungen der Operationsmaske: 17 cm x 9,5 cm.

Ohrfixierung durch Gummiband.

Verpackung und rechtliche Hinweise auf FRANZÖSISCH

Einwegschutzmasken - 10 Karton mit 50 Stück

Covid-schutzmaterial - Foto n° 2





Descriptif de nos masques chirurgicaux :

- non stérile et à usage unique
- 3 plis
- ≥98 % d'efficacité de filtration bactérienne
- Filtre gouttelettes, pollen, poussières
- Composé de 3 épaisseurs
- couvre le nez et la bouche
- Dimensions du masque chirurgical : 17 cm x 9,5 cm
- Fixation auriculaire par élastique
- Matière : support en intissé, filtre en fibre de Polypropylène
- Durée de conservation : 2 ans
- Disponible en boîte de 50 masques



Nos masques sont certifiés conforme à la norme européenne en vigueur EN14683 : 2019

SPEZIFIKATIONEN

Marke	Securite shopping
Standplatte	
Befestigung	Keine befestigung
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Lieferzeit	1-3 arbeitstage
Kategorie	Covid-schutzmaterial
Typ	Kontrollgerate

DETAIL

Los mit 10 Kartons mit 50 chirurgischen Einwegmasken.

Chirurgische Masken Typ II - ERWACHSENE

3-lagig - nicht steril und zum einmaligen Gebrauch
Bakterienfiltrationseffizienz > 98% (Typ 2).

Filtertröpfchen, Pollen, Staub.

Bestehend aus 3 Schichten (initiiertes Träger / Polypropylenfaserfilter).

Deckt Nase und Mund ab.

Abmessungen der Operationsmaske: 17 cm x 9,5 cm.

Ohrfixierung durch Gummiband.

Verpackung und rechtliche Hinweise auf FRANZÖSISCH

Fiche technique des masques chirurgicaux

Pour une protection optimale, le masque chirurgical doit être posé avec attention sur votre visage. Les étapes suivantes vous permettront d'être protégé efficacement :

- 1 - Se laver les mains et placer le haut du masque sur le nez et les bandes élastiques autour des oreilles, face bleue à l'extérieur
- 2 - Ajuster la baguette du bord haut du masque sur le nez pour adapter la forme à votre morphologie, puis déployer le bas du masque sous votre menton
- 3 - Procéder aux derniers ajustements pour assurer une couverture efficace du nez et de la bouche
- 4 - Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains
- 5 - Lavez-vous les mains après avoir retiré votre masque, et jetez-le dans une poubelle fermée après usage

Mise en garde :

- Ce produit est à usage unique, il est jetable et ne peut pas être lavé et réutilisé.
- Durée d'utilisation recommandée : 4 heures
- Ne pas utiliser en salle stérile ou en salle d'opération
- Ce produit ne doit pas être utilisé après sa date limite de conservation (voir sur le dessous de la boîte ou si l'emballage est endommagé)
- Le produit doit être stocké au sec et à l'abri de température extrêmes





SPEZIFIKATIONEN

Marke	Securite shopping
Standplatte	
Befestigung	Keine befestigung
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Lieferzeit	1-3 arbeitstage
Kategorie	Covid-schutzmaterial
Typ	Kontrollgerate

DETAIL

Los mit 10 Kartons mit 50 chirurgischen Einwegmasken.

Chirurgische Masken Typ II - ERWACHSENE

3-lagig - nicht steril und zum einmaligen Gebrauch

Bakterienfiltrationseffizienz > 98% (Typ 2).

Filtertröpfchen, Pollen, Staub.

Bestehend aus 3 Schichten (initiiertes Träger / Polypropylenfaserfilter).

Deckt Nase und Mund ab.

Abmessungen der Operationsmaske: 17 cm x 9,5 cm.

Ohrfixierung durch Gummiband.

Einwegschutzmasken - 10 Karton mit 50 Stück Covid-schutzmaterial - Foto n° 4



SPEZIFIKATIONEN

Marke	Securite shopping
Standplatte	
Befestigung	Keine befestigung
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Lieferzeit	1-3 arbeitstage
Kategorie	Covid-schutzmaterial
Typ	Kontrollgerate

DETAIL

Los mit 10 Kartons mit 50 chirurgischen Einwegmasken.

Chirurgische Masken Typ II - ERWACHSENE

3-lagig - nicht steril und zum einmaligen Gebrauch
Bakterienfiltrationseffizienz > 98% (Typ 2).

Filtertröpfchen, Pollen, Staub.

Bestehend aus 3 Schichten (initiiertes Träger / Polypropylenfaserfilter).

Deckt Nase und Mund ab.

Abmessungen der Operationsmaske: 17 cm x 9,5 cm.

Ohrfixierung durch Gummiband.

Verpackung und rechtliche Hinweise auf FRANZÖSISCH

Einwegschutzmasken - 10 Karton mit 50 Stück

Covid-schutzmaterial - Foto n° 5



SPEZIFIKATIONEN

Marke	Securite shopping
Standplatte	
Befestigung	Keine befestigung
Ref ID	mas-de-pro-3071 3071
Lieferzeit	1-3 arbeitstage
Kategorie	Covid-schutzmaterial
Typ	Kontrollgerate

DETAIL

Los mit 10 Kartons mit 50 chirurgischen Einwegmasken.

Chirurgische Masken Typ II - ERWACHSENE

3-lagig - nicht steril und zum einmaligen Gebrauch
Bakterienfiltrationseffizienz > 98% (Typ 2).

Filtertröpfchen, Pollen, Staub.

Bestehend aus 3 Schichten (initiiertes Träger / Polypropylenfaserfilter).

Deckt Nase und Mund ab.

Abmessungen der Operationsmaske: 17 cm x 9,5 cm.

Ohrfixierung durch Gummiband.

Verpackung und rechtliche Hinweise auf FRANZÖSISCH).

CE-zertifiziert - EN14683: 2019