

Masques de protection jetables -10 Boites de 50 **48,00 €H.T.**

Materiel protection covid



Nos masques sont certifiés conforme à la norme européenne en vigueur EN14683 : 2019

Fiche technique des masques chirurgicaux

Pour une protection optimale, le masque chirurgical doit être porté avec attention sur votre visage. Les détails suivants vous permettent d'être protégé efficacement :

- 1 - Se laver les mains et placer le haut du masque sur le nez et les bandes élastiques autour des oreilles, face devant à l'extérieur.
- 2 - Ajuster la bague du bord haut du masque sur le nez pour adapter la forme à votre morphologie, puis appuyer le bas du masque sous votre menton.
- 3 - Procéder aux derniers ajustements pour assurer une couverture efficace du nez et de la bouche.
- 4 - Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
- 5 - Lancer/recueillir les mains après avoir retiré votre masque, et jeter-le dans une poubelle fermée après usage.

Mise en garde :

- Ce produit est à usage unique. Il est jetable et ne peut pas être lavé et réutilisé.
- Durée d'utilisation recommandée : 4 heures.
- Ne pas utiliser en cas de fièvre ou en cas d'opération.
- Ce produit ne doit pas être utilisé après sa date limite de conservation (voir sur le dessous de la boîte ou le emballage en endoremballage).
- Le produit est libre accord au sec et à l'abri de température extrêmes.
- Ce produit est un dispositif médical.



CARACTÉRISTIQUES

Marque	Securite shopping
Base	
Fixation	Pas de fixation
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Délai de livraison	1-3 jours ouvrés
Catégorie	Materiel protection covid
Type	Système de sécurité

DÉTAIL

Lot de 10 boites de 50 masques Chirurgicaux à usage unique.

Masques Chirurgicaux type II - ADULTE

3 plis - non stérile et à usage unique
Efficacité de filtration bactérienne > 98% (type 2).

Filtre gouttelettes, pollen, poussières.

Composé de 3 épaisseurs (support initissé / filtre en fibre de polypropylène).

Couvre le nez et la bouche.

DESCRIPTION

Fixation auriculaire par élastique.

Masque de protection chirurgical 3 plis à usage unique

Masque non tissé Bleu, taille unique avec élastique pour une meilleure protection.

Pour prévenir la propagation du **Covid-19**, rhumes et de la grippe, il protège à la fois le porteur du masque contre les germes pathogènes et son entourage de toute dissémination microbienne.

Certifié CE - EN14683:2019

Pour assurer une protection maximale, le masque doit-être remplacé régulièrement dans la journée. Le temps de port conseillé est de 4 heures maximum.

Masques de protection jetables -10 Boites de 50

Masques de protection jetables - 10 Boites de 50 masques chirurgicaux type 2 Adulte - Conforme norme **EN14683/2019**

Banner de tests sur demande



CARACTÉRISTIQUES

Marque	Securite shopping
Base	
Fixation	Pas de fixation
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Délai de livraison	1-3 jours ouvrés
Catégorie	Matériel protection covid
Type	Système de sécurité

DÉTAIL

Lot de 10 boîtes de 50 masques Chirurgicaux à usage unique.

Masques Chirurgicaux type II - ADULTE

3 plis - non stérile et à usage unique
Efficacité de filtration bactérienne > 98% (type 2).

Filtre gouttelettes, pollen, poussières.

Composé de 3 épaisseurs (support initissé / filtre en fibre de polypropylène).

Couvre le nez et la bouche.

Dimensions du masque chirurgical : 17 cm x 9,5 cm.

Fixation auriculaire par élastique.

Packaging et mentions légales en FRANÇAIS

Masques de protection jetables -10 Boîtes de 50

Matériel protection covid - Photo n° 2





Descriptif de nos masques chirurgicaux :

- non stérile et à usage unique
- 3 plis
- ≥98 % d'efficacité de filtration bactérienne
- Filtre gouttelettes, pollen, poussières
- Composé de 3 épaisseurs
- couvre le nez et la bouche
- Dimensions du masque chirurgical : 17 cm x 9,5 cm
- Fixation auriculaire par élastique
- Matière : support en intissé, filtre en fibre de Polypropylène
- Durée de conservation : 2 ans
- Disponible en boîte de 50 masques



Nos masques sont certifiés conforme à la norme européenne en vigueur EN14683 : 2019

CARACTÉRISTIQUES

Marque	Securite shopping
Base	
Fixation	Pas de fixation
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Délai de livraison	1-3 jours ouvrés
Catégorie	Materiel protection covid
Type	Système de sécurité

DÉTAIL

Lot de 10 boîtes de 50 masques Chirurgicaux à usage unique.

Masques Chirurgicaux type II - ADULTE

3 plis - non stérile et à usage unique
Efficacité de filtration bactérienne > 98% (type 2).

Filtre gouttelettes, pollen, poussières.

Composé de 3 épaisseurs (support intissé / filtre en fibre de polypropylène).

Couvre le nez et la bouche.

Dimensions du masque chirurgical : 17 cm x 9,5 cm.
Fixation auriculaire par élastique.

Masques de protection jetables -10 Boîtes de 50

Materiel protection covid - Photo n° 3

Fiche technique des masques chirurgicaux

Pour une protection optimale, le masque chirurgical doit être posé avec attention sur votre visage. Les étapes suivantes vous permettront d'être protégé efficacement :

- 1 - Se laver les mains et placer le haut du masque sur le nez et les bandes élastiques autour des oreilles, face bleue à l'extérieur
- 2 - Ajuster la baguette du bord haut du masque sur le nez pour adapter la forme à votre morphologie, puis déployer le bas du masque sous votre menton
- 3 - Procéder aux derniers ajustements pour assurer une couverture efficace du nez et de la bouche
- 4 - Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains
- 5 - Lavez-vous les mains après avoir retiré votre masque, et jetez-le dans une poubelle fermée après usage

Mise en garde :

- Ce produit est à usage unique, il est jetable et ne peut pas être lavé et réutilisé.
- Durée d'utilisation recommandée : 4 heures
- Ne pas utiliser en salle stérile ou en salle d'opération
- Ce produit ne doit pas être utilisé après sa date limite de conservation (voir sur le dessous de la boîte ou si l'emballage est endommagé)
- Le produit doit être stocké au sec et à l'abri de température extrêmes





CARACTÉRISTIQUES

Marque	Securite shopping
Base	
Fixation	Pas de fixation
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Délai de livraison	1-3 jours ouvrés
Catégorie	Matériel protection covid
Type	Système de sécurité

DÉTAIL

Lot de 10 boîtes de 50 masques Chirurgicaux à usage unique.

Masques Chirurgicaux type II - ADULTE

3 plis - non stérile et à usage unique

Efficacité de filtration bactérienne > 98% (type 2).

Filtre gouttelettes, pollen, poussières.

Composé de 3 épaisseurs (support initissé / filtre en fibre de polypropylène).

Couvre le nez et la bouche.

Dimensions du masque chirurgical: 17 cm x 9,5 cm.

Fixation auriculaire par élastique.

Masques de protection jetables - 10 Boîtes de 50 Matériel protection covid - Photo n° 4



CARACTÉRISTIQUES

Marque	Securite shopping
Base	
Fixation	Pas de fixation
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Délai de livraison	1-3 jours ouvrés
Catégorie	Materiel protection covid
Type	Système de sécurité

DÉTAIL

Lot de 10 boîtes de 50 masques Chirurgicaux à usage unique.

Masques Chirurgicaux type II - ADULTE

3 plis - non stérile et à usage unique
Efficacité de filtration bactérienne > 98% (type 2).

Filtre gouttelettes, pollen, poussières.

Composé de 3 épaisseurs (support initissé / filtre en fibre de polypropylène).

Couvre le nez et la bouche.

Dimensions du masque chirurgical : 17 cm x 9,5 cm.

Fixation auriculaire par élastique.

Packaging et mentions légales en FRANÇAIS

Masques de protection jetables -10 Boîtes de 50

Materiel protection covid - Photo n° 5



CARACTÉRISTIQUES

Marque	Securite shopping
Base	
Fixation	Pas de fixation
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Délai de livraison	1-3 jours ouvrés
Catégorie	Materiel protection covid
Type	Système de sécurité

DÉTAIL

Lot de 10 boites de 50 masques Chirurgicaux à usage unique.

Masques Chirurgicaux type II - ADULTE

3 plis - non stérile et à usage unique
Efficacité de filtration bactérienne > 98% (type 2).

Filtre gouttelettes, pollen, poussières.

Composé de 3 épaisseurs (support initissé / filtre en fibre de polypropylène).

Couvre le nez et la bouche.

Dimensions du masque chirurgical : 17 cm x 9,5 cm.

Fixation auriculaire par élastique.

Packaging et mentions légales en FRANCAIS.

Certifié CE - EN14683:2019